

Producto:

**MASCARILLA HIGIÉNICA
ESPECÍFICA PARA HACER DEPORTE**

Revisión: 02
Fecha revisión: 28/09/2020



DESCRIPCIÓN:

Mascarilla higiénica reutilizable en conformidad con criterios técnicos de eficacia de la Especificación UNE 0065:2020 “Mascarilla higiénica reutilizable para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso”. Consta de cuatro capas, fabricada, y certificada en España, patentada como Modelo comunitario en la UE.

Es una mascarilla que permite la práctica deportiva debido a su altísima respirabilidad y que previene la transmisión de contagios gracias a sus capas filtrantes que evitan el paso de líquidos a su través y con ellos de microorganismos patógenos.

Fabricada en polipropileno 100%, es totalmente reciclable.

Eficacia de filtración según protocolos adaptados a normas armonizadas. Posee valores de filtración de patógenos definidos para las mascarillas asignables a las clases FFP2 o KN95.

Adaptable a cualquier fisonomía gracias a su novedoso diseño (patentado) con sus tres cinchas a las orejas para tres grados de ajuste, que proporcionan una perfecta sujeción dependiendo del tamaño de la

cabeza/cara del usuario/a.

Puede lavarse en bolsa para ropa delicada con programas de ropa delicada hasta 5 veces. Para desinfectar y lavar al mismo tiempo es preferible sumergirla en nuestro desinfectante registrado que aparece en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad SANISPORT LOCIÓN DESINFECTANTE durante 5 minutos y dejar secar después al aire.

COLORES / TALLAS:

- AZUL / Talla Adulto-Infantil Estándar
- AZUL / Talla Adulto XXL

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

- Bolsas de 5 unidades

ENSAYOS QUE ACOMPAÑAN A ESTA FICHA TÉCNICA: (pueden consultarse en www.sanisport.es)

Eficacia de filtración según protocolos adaptados a normas armonizadas realizados por ITENE

ENSAYO	RESULTADO
Eficiencia de filtración bacteriana y vírica (BFE), (%)	96,83
Eficiencia de filtración bacteriana y vírica (BFE), (%) tras cinco lavados en lavadora dentro de bolsa de tela y programa para ropa delicada	95,52
Eficiencia de filtración bacteriana y vírica (BFE), (%) tras cinco etapas de lavado desinfectante con Etanol al 70%	94,23

Ensayo de Respirabilidad realizado por AITEX

ENSAYO	RESULTADO
Respirabilidad, (%)	18

Conformidad con criterios técnicos de eficacia de la especificación UNE 0065:2020 realizado por ITENE

ENSAYO	RESULTADO
Conformidad con criterios técnicos de eficacia de la especificación UNE 0065:2020	Apta

Ensayos de esfuerzo bajo supervisión médica realizada en _____ por el Dr. _____

Conclusiones al estudio de la mascarilla específica para deportistas de cuatro capas:

- El uso de la mascarilla se asoció a aumentos de la frecuencia cardiaca de un 5% por minuto y de un mayor volumen pulmonar por ciclo respiratorio de un 11%, que podría explicarse por la mayor frecuencia cardiaca
- No hubo diferencias significativas en los valores reales de consumo de oxígeno ni de la producción de dióxido de carbono
- Las respuestas de frecuencia cardiaca y pulmonar al uso de la mascarilla SANISPORT durante una hora a un ritmo bajo-moderado son relativamente pequeñas y, en general, deben ser bien toleradas por personas sanas.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar seco y bien ventilado. No almacenar cerca de fuentes de calor. Mantener alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

ADVERTENCIA:

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425

GENERALIDADES:

FICHA TÉCNICA

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.



NOTA: Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA:

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia

de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y ajustar mediante las hendiduras de los extremos en ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla y la nariz.
7. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
8. En caso de no ajustar bien pueden realizarse cortes entre las cinchas de manera que el ajuste quede lo más perfecto posible.

RETIRADA DE LA MASCARILLA:

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
 2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
-

FICHA TÉCNICA

3. Retirar la mascarilla sin tocar su parte frontal.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica y desecharla.

PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.

Durante el mismo periodo de 4 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

REUTILIZACIÓN Y LAVADO

Puede lavarse en bolsa para ropa delicada con programas de ropa delicada hasta 5 veces. Para desinfectar y lavar al mismo tiempo es preferible sumergirla en nuestro desinfectante registrado que aparece en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad SANISPORT LOCIÓN DESINFECTANTE durante 5 minutos y dejar secar después al aire.

